

***Vorher wissen,
ob eine Protrusionsschiene für
gesunden Schlaf helfen kann***

Test-Kit RP-QC®



Test-Kit für eine UPS-Probeschiene

- Kostengünstig
- In wenigen Minuten am Patienten angefertigt
- In nur vier Schritten zum Erfolg
- Aussagekräftig
- Für Distal-, Mesial- und Kopfbisslage

In nur vier Schritten

Das Test-Kit RP-QC® bietet ein neues und kostengünstiges Verfahren, um die Wirksamkeit einer Unterkiefer-Protrusionsschiene (UPS) im Vorfeld festzustellen.

Die Herstellung der Probeschiene erfolgt mittels individuell gewähltem Formteil, das in thermoplastisches Material eingebettet und direkt am Patienten ausgeformt wird. Dies bewirkt eine Lagesicherung des Unterkiefers in protrusiver Position sowie eine Vorverlagerung des Zungen- und Gaumensegels.

Nach einer Eingewöhnungszeit von 3 bis 5 Nächten erfolgt ein nächtliches Screening per Polygraphie.

Zeigt das Ergebnis des Kontrollscreenings, dass die Schiene wirksam ist, kann die Abdrucknahme für die Anfertigung der UPS erfolgen.

Anwendungsmöglichkeiten RP-QC®

Für Kopfbiss



Kein Versatz

Für Distalbiss



2 mm



4 mm

Für mesialen Biss



2 mm



4 mm

Die Formteile für das Test-Kit RP-QC® gibt es in fünf Versionen: Distal- und Mesialbisslage mit je 2 und 4 mm Vorschub, Kopfbisslage



1. Ausgewähltes Formteil umschließen



2. Fixiermasse um die Schiene



3. Mobilität herstellen



4. Fertigstellen mit Protrusion

ten zum Erfolg!



nteil mit Fixiermasse



e Zähne modellieren



n



assprobe

Unnötige Kosten für das Anfertigen einer UPS, die nicht hilft, werden so vermieden.

Somit bietet das Test-Kit RP-QC® allen Beteiligten mehr Sicherheit und erleichtert die Entscheidung für die Therapieform.

Der Mediziner kann mit Sicherheit sagen, ob die Versorgung mit einer UPS erfolgreich sein wird und **die erhobenen Ergebnisse können gegenüber den Krankenkassen als Argumentationshilfe zur Kostenübernahme genutzt werden.**

Und der Patient kann selbst schon vor Anfertigung der finalen Schiene einschätzen, ob er ein solches intraorales Gerät überhaupt toleriert.

Indikation

- Leichtes bis mittelgradiges OSAS
- CPAP Non-Compliance
- Zur Druckreduzierung bei CPAP
- Schnarchen

KOFL Röers - das kieferorthopädische Fachlabor mit über 25-jähriger Erfahrung

- Wir liefern qualitativ hochwertige Arbeiten
- Fachlich kompetent und innovativ
- Zuverlässig und termintreu
- Europaweiter Service

Auszug aus unserem Angebotsspektrum

- Kieferorthopädische Geräte
- Funktionskieferorthopädische Geräte
- Orthodontische Geräte
- Anti-Schnarch- und Apnoe-Schienen (UPS)
- Funktionsschienen
- Sportschutz
- Funktioneller Zahnersatz

Für Rückfragen steht Ihnen die überweisende Praxis gerne zur Verfügung:

**Kieferorthopädisches Fachlabor
KOFL Röers GmbH**

Münsterstraße 28 | 48351 Everswinkel
Fon 0 25 82 - 74 28 | Fax 0 25 82 - 83 28

roers@kofl.de
www.kofl.de