



*Dinge einfach
besser machen!*



KOFL Röers GmbH
www.kofl.de

UPS-Probeschiene

Test-Kit RP-QC (Röers-Protrusion-Quick-Check)

Das Test-Kit RP-QC bietet ein neues und kostengünstiges Verfahren, um die Wirksamkeit einer Unterkiefer-Protrusionsschiene (UPS) im Vorfeld festzustellen.

Die Herstellung der Probeschiene erfolgt mittels individuell gewähltem Formteil, das in thermoplastisches Material eingebettet und direkt am Patienten ausgeformt wird. Dies bewirkt eine Lage-sicherung des Unterkiefers in protrusiver Position sowie eine Vorverlagerung des Zungengrunds und die Stra-fung des Gaumensegels.



Nach einer Eingewöh-nungszeit von 3 bis 5 Nächten erfolgt ein nächt-liches Screening per Poly-graphie. Zeigt das Ergebnis des Kontroll-screenings, dass die Schiene wirksam ist, kann die Ab-drucknahme für die Anfertigung der UPS erfolgen.

Unnötige Kosten für das Anfertigen einer UPS, die nicht hilft, werden so vermieden.

UPS-Probeschiene

Neu!

Test-Kit RP-QC (Röers-Protrusion-Quick-Check)

Für den Patienten ist die Herstellung einer Probeschiene eine Selbstzahlerleistung.

Indikation

- Leichtes bis mittelgradiges OSAS
- CPAP Non-Compliance
- zur Druckreduzierung bei CPAP
- Schnarchen

Vorteile

- Schnell anzufertigen und direktes Ergebnis bzgl. der Wirksamkeit einer UPS
- Einfache Handhabung
- Drei Versionen: Distal- und Mesialbisslage mit je 2 und 4 mm Vorschub, Kopfbisslage

Bestellangaben

- Komplettes Set für 10 Schienen Best.-Nr. 11001
- Nachfüllsets für jeweils 10 Schienen
- 10 Formteile (Kopfbiss) inkl. Granulat Best.-Nr. 11002
- 5 + 5 Formteile (Distalbiss) inkl. Granulat Best.-Nr. 11003
- 5 + 5 Formteile (Mesialbiss) inkl. Granulat Best.-Nr. 11004

*Dinge einfach
besser machen!*



KOFL Röers GmbH
www.kofl.de



**Kieferorthopädisches Fachlabor
KOFL Röers GmbH**

Münsterstraße 28 | 48351 Everswinkel
Fon 0 25 82 - 74 28 | Fax 0 25 82 - 83 28
E-Mail: roers@kofl.de | www.kofl.de